

Attends® Soft




Protocoles d'utilisation Soft 0 à 7 et Contours 5



1

Découlez le papier protecteur de la surface adhésive à l'arrière du produit.

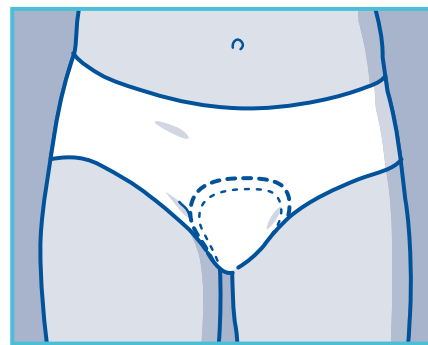

2

Fixez la protection en plaçant la surface adhésive dans votre sous-vêtement moulant, en évitant que l'adhésif touche la peau.

Conseils pour une application correcte

Sélection

- Choisissez le niveau d'absorption de la protection en fonction de l'évaluation individuelle du degré d'incontinence du consommateur.
- Pour une performance optimale, nous vous suggérons d'utiliser ce produit en combinaison avec un sous-vêtement bien ajusté.
- Ne choisissez pas un produit trop grand quand il ne vous faut pas ce niveau d'absorption: une couche plus petite relève le sentiment de dignité et de confort pour l'utilisateur.

Enlèvement

- Enroulez la protection usagée et jetez la dans la poubelle déchets.
- Pour les protections Attends Soft 1 - 3+ vous pouvez utiliser l'enveloppe jetable pour jeter le produit.
- Ne pas jeter la protection dans les toilettes.



Les protection anatomiques Attends Soft sont testées et approuvées par proDERM, l'Institut Germanique renommé de la Recherche dermatologique appliquée.

Pour plus d'informations visitez

www.attends.fr www.attends.be www.attends.ch